

Scheda Tecnica

PROTECTIVE MASK I FFP2

Protezione contro particelle solide o liquide di media tossicità



Cod. 28650



Descrizione:

Facciale filtrante tipo FFP2 a 5 strati, in polipropilene, pieghevole, con stringinaso regolabile e con elastici. Scatola da 10 pz imbustate singolarmente, 72 box per cartone, 720 pezzi per cartone.

Questo facciale filtrante è classificato in base alla sua efficienza di filtrazione e alla sua perdita totale massima verso l'interno. FFP2: Respiratore di protezione contro le particelle solide e liquide di media tossicità. Può essere utilizzato per concentrazioni di contaminante fino a 10 volte il valore limite ponderato (VME).

Conformità:

EN149:2001+A1:2009 NR.
DPI III Categoria.

Colore:

Bianco

Codice Ean: 868276477

Limitazioni d'uso:


Prima di utilizzare il facciale filtrante l'utente deve ricevere la formazione necessaria. Indossare il facciale filtrante in zone ben areate, con concentrazione di ossigeno >a 20%. Il respiratore deve essere perfettamente posizionato per garantire il livello di protezione previsto. Non utilizzare se i peli del viso (barba, basette) impediscono l'impermeabilità del respiratore e provocano una perdita. Allontanarsi immediatamente se la respirazione diventa difficile e/o se si provano degli stordimenti o malesseri. Non modificare in nessun modo questo facciale filtrante, se danneggiato scartarlo. Il non rispetto di queste istruzioni per l'uso può provocare danni alla salute dell'utente ed esporlo a seri traumi, o mettere la sua vita in pericolo. Il contatto con la pelle può provocare delle reazioni allergiche alle persone sensibili.

In questo caso consultare un medico.

Scheda Tecnica

PROTECTIVE MASK I FFP2

Protezione contro particelle solide o liquide di media tossicità

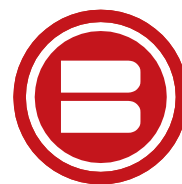

BERTOZZI

1 9 7 4

Istruzioni di stoccaggio:

Stoccare al fresco, all'asciutto, al riparo dal gelo e dalla luce, nella sua confezione d'origine ad una temperatura compresa tra -30°C e +65°C - HR<85%.

Istruzioni di pulizia/manutenzione:

Monouso, gettarlo dopo averlo usato.

Prestazioni:

Conforme alla Direttiva Europea 2016/425 e alle norme EN149:2001+A1:2009.

Istruzioni per l'uso:

Togliere il facciale filtrante dalla sua confezione solo prima di utilizzarlo. Utilizzare soltanto quando la concentrazione di contaminanti non rappresenta un pericolo immediato di vita o alla salute e soltanto conformemente alle norme applicabili in materia di salute e di sicurezza. Prima di ogni utilizzo del respiratore verificare la sua integrità, la data limite d'utilizzo (sotto alla sua scatola) e che la sua classe di protezione (FFP2) convenga all'applicazione (prodotto utilizzato e concentrazione). Non dev'essere riutilizzato per oltre un giorno lavorativo.

Come indossare una mascherina FFP2



Posizionare i elastici rivolti verso l'alto e tira la metà inferiore sul naso e sulla bocca



Sistemare il filo intorno al naso

Accertarsi che non ci siano spazi vuoti



Bertozzi S.r.l.: Via Filagni, 2
43044 Collecchio (Parma)
+39 0521 804454
info@bertozzisrl.it | www.bertozzisrl.it